

Glaps



ESPÁTULA ULTRASÓNICA

Presentación
Comercial.

Espátula Ultrasónica

Las espátula ultrasónica pertenece a una nueva generación de aparatología enfocada al peeling no agresivo. Usando las propiedades del ultrasonido, ofrece una regeneración segura, sin dolor y muy efectiva. Remueve las capas superficiales de la piel mediante una exfoliación mecánica, mientras que estimula el rejuvenecimiento de la misma. El ultrasonido es una onda de vibración de alta frecuencia que se utiliza en medicina y en cosmética.

Produce un efecto de resonancia suave en la piel a baja energía y vibración de alta frecuencia, mejorando la permeabilidad cutánea, reduciendo el tamaño de los poros, ayudando a la desobstrucción de los mismos.

Normaliza las secreciones sebáceas y sudoríparas. El dispositivo ultrasónico utiliza nanotecnología molecular, vibrando 24000 veces por segundo de intensa fricción. Combinándola al mismo tiempo con los productos adecuados esta acción produce un masaje profundo que mejora la micro-circulación, aumentando la penetración del cosmético, la nutrición y oxigenación de la piel, logrando un efecto altamente significativo.



Ficha Técnica

Nombre del Producto	ESPATULA ULTRASONICA
Color:	Blanco
Material:	ABS
Tamaño & Peso	17.5*5.5*1.5cm
Packaging	Gift box (presentación de lujo)
Tamaño packaging	21*19,5*5 cm
Características tecnológicas	Ultrasonido de alta frecuencia 24.000 hz
Especificaciones:	Alta frecuencia
Voltage de salida	5V - 2W
Voltage de entrada	AC 100V-240V 50HZ/60HZ
Adaptador	Cargador USB
Capacidad de la batería	500 mAh
Tiempo de carga	3 horas
Tiempo de autonomía	2 horas
Frecuencia de uso	2-3 veces por semana



MODO DE USO



- Una vez retirado el film protector, asegurarse que la batería se encuentre cargada (ver preguntas frecuentes)
- Presione el botón de encendido durante dos segundos para encender el dispositivo.
- Si la función a utilizar será la de **peeling (cleasing)** presione el botón una vez más
- Aplique gel de limpieza o neutro en el rostro
- Deslice la espátula con el ángulo hacia abajo siguiendo las líneas del rostro
- En la función de **Absorción (moisturizing)** presione el botón dos veces para selección.
- Aplique el producto cosmético (debe ser base acuosa en general) sobre la zona a tratar
- Realice movimientos suaves con la espátula deslizándola con el ángulo hacia arriba
- En la función **Lifting** presione el botón tres veces para selección
- Aplique el producto sobre la zona a tratar
- Realice movimientos suaves con la espátula, siguiendo las líneas del rostro con ángulo hacia arriba.

Es ideal combinar el uso de la espátula ultrasónica con productos cosméticos como geles, lociones, serums, gel cream o ampollas, con activos acordes a cada necesidad de la piel o momento de tratamiento. En todos los modos la piel debe permanecer húmeda durante el proceso de aplicación.



Garantía Glaps

Recuerda que todos los equipos de Glaps cuentan con 6 (seis) meses de garantía por mal funcionamiento. Con la factura de compra y la garantía menor o igual a 6 meses enviar un mail a ventas@glaps.com describiendo el problema del dispositivo. Adjuntar video y/o fotos.



Producto
certificado

PREGUNTAS FRECUENTES

¿De donde se enciende?

Mantener el botón de power presionado durante dos segundos y el equipo se enciende observándose las luces de led azules prendidas.

¿Cómo sé si tiene batería suficiente?

Cuando uno lo carga con su puerto USB si las tres luces titilan alternadamente el equipo se encuentra con mínima carga de batería, si titilan dos de ellas está con media carga. Y si titila una sola o se queda fija es que ya la carga ha sido realizada a full

¿Puedo aplicarlo en una piel sensible?

En las funciones de nutrición y lifting no hay inconveniente, pero en la de Cleasing si se realiza presión es probable que se irrite, puede hacerse de modo mas suave y complementar luego el tratamiento con el Masajeador frío calor (función frio)

¿Puedo aplicarla en otras partes del cuerpo más alla del rostro?

Por supuesto, los hombros, espalda o pecho suelen ser lugares de concentración de comedones y células muertas para realizar una acción de peeling.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué contraindicaciones tiene?

Al trabajar con ultrasonido de alta frecuencia se evita su uso con embarazadas
Personas con marcapasos o trasplantes. Implantes metálicos de importancia. Enfermedad de piel, erupciones, quemaduras, infecciones o heridas abiertas.



¿Cuántas veces debo usar el equipo para ver resultados?

En la función cleansing se recomienda no mas de 2 veces por semanas. En las otras dos funciones no hay restricciones de uso.

¿Funciona con alguna marca de cremas / geles en particular?

Los equipos Glaps sinergizan con todas las buenas marcas presentes en el mercado. Consulte con su cosmetóloga que vehículos y que activos son recomendables para cada protocolo de uso.


¿Hay algún paso a paso donde pueda guiarme para los diferentes tratamientos?

En nuestra página oficial puedes consultar los diferentes protocolos de uso y su paso a paso mas la recomendación de los productos a utilizar: www.glaps.com

ACCION DE LA ESPATULA ULTRASONICA EN NUESTRA DERMIS



ANGULOS DE USO DE LA PALA QUIRURGICA SEGÚN FUNCION

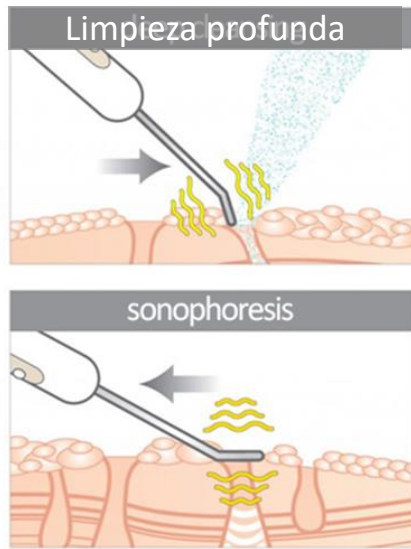

Descripción del producto



Cosmetic slice: no need to change it because it can be re-used for many times as long as you wish it clearly



One-touch switch: control it with one button, different presses indicate different modes




Button charge jack: ease charging steps, available to connect with computers, power banks, and hubs



Un dispositivo para múltiples soluciones



Ultrasonic Vibration for Deep Cleansing

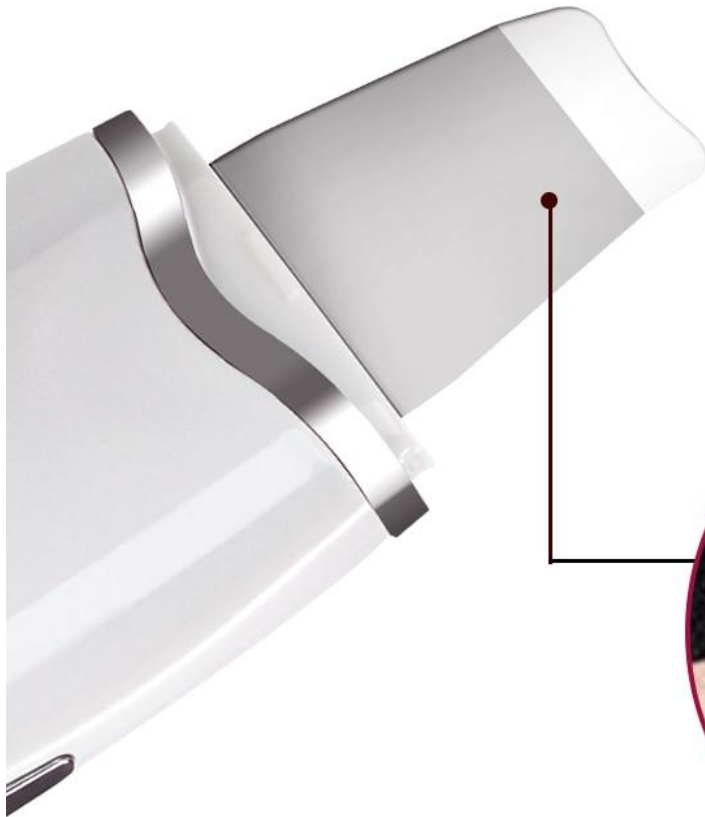

Ultrasonido de alta
frecuencia para
barrer las células
muertas y las
impurezas

