

Glaps



MASAJEADOR
FRIO - CALOR
CON VIBRACION

Presentación
Comercial.

Masajeador Frio Calor

Aparatología techie para máximos resultados



El aparato posee 3 funciones: Masajes con calor, masajes con frío más la vibración que combinada con el calor / frío incrementa la acción de ambos. Su utilización es ideal para prevenir arrugas, ablandar contenido folicular (comedones y otras impurezas) realizando así una limpieza profunda de la piel y mantener la hidratación. Ayuda a facilitar la circulación sanguínea y linfática revitalizando, mejorando la nutrición, oxigenación y detoxificación de la piel. Tiene además acción reafirmante y ayuda a la absorción de activos cosméticos.

Cuando se trabaja la opción calor, la temperatura del aparato alcanza los 42°C, esto produce el ablande del contenido folicular facilitando una limpieza profunda. Ayuda a mejorar la circulación sanguínea y la absorción de producto cosmético. La performance se potencia con la acción del masaje vibratorio.

En la opción frío la temperatura puede bajar hasta los 6°C, ayudando a tensar la piel y reducir el tamaño de los poros, fortalecer el colágenos, acelerar la absorción de los nutrientes y aumentar la elasticidad. Los efectos se potencian con el masaje.

Ficha Técnica

Nombre del Producto	MASAJEADOR FRIO CALOR
Color & Modelo	Negro - MR199Hq
Material:	ABS+ Componentes eléctricos
Tamaño & Peso	15*3,7*2,5 cm
	Peso Neto: 166 gr.
Packaging	Gift box (presentación de lujo)
Tamaño packaging	19*8*7 cm
Características tecnológicas	Alta frecuencia de 9000 (+-10) rpm
Capacidad de la batería	750 mAh
Tiempo de carga	3,5 horas
Autonomía de uso	1 hora
Tamaño de la sonda metálica	25 mm
Temperaturas predeterminadas	38°C, 40°C, 42°C // 6°C, 8°C, 10°C
Voltage de entrada y salida	Entrada: DC5V 2.5 W
Adaptador	DC head USB line



MODO DE USO

- Encienda el equipo verificando que esté con carga de batería.
- En el display se marca la capacidad de carga en la parte superior derecha.
- Luego configure cual de las funciones va a utilizar, si frio o calor. Eligiendo entre las tres temperaturas pre seteadas a tal fin para cada uno de ellos.
- En caso de desear añadir la función de vibración / masaje pulsar el botón que se encuentra al costado derecho del equipo.
- Antes de comenzar su aplicación en el rostro, cerciorarse en el antebrazo si la temperatura es la deseada (normalmente hacia el calor hay mayor sensibilidad que hacia el frio)
- Recuerde que el equipo funciona con productos cosmecéticos adecuados a cada protocolo
- La programación del equipo está seteada en 5 minutos, transcurridos los mismos el dispositivo se apagará. Pudiendo reiniciar la operación.



Garantía Glaps

Recuerda que todos los equipos de Glaps cuentan con 6 (seis) meses de garantía por mal funcionamiento. Con la factura de compra y la garantía menor o igual a 6 meses enviar un mail a ventas@glaps.com describiendo el problema del dispositivo. Adjuntar video y/o fotos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿De donde se enciende?

El Masajeador Frío Calor se enciende del botón que se encuentra al costado.

¿Debo usarlo enchufado?

No, el dispositivo se carga con un puerto USB que ingresa desde abajo. Con una carga de 3.5 hs permite una autonomía de 60 minutos de utilización.

¿Cómo se si debo cargar la batería?

En la parte superior del display tiene una barra de consumo de energía. Cuando quede una sola es conveniente prever la recarga de la misma.

¿Puedo ponerlo en la heladera o freezer para masajes con frío?

No, el equipo es eléctrico y no puede humedecerse ni mojarse. Ya tiene la función «frio» incorporada. Recuerde higienizarlo con algún paño y líquido aséptico al finalizar.

¿Debo usarlo con vibración obligatoriamente?

No, la posibilidad de uso es elección de cada uno, como los grados a configurar

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué contraindicaciones tiene?

No posee contraindicaciones.



¿Cuántas veces debo usar el equipo para ver resultados?

Este dispositivo no invasivo nos permite utilizarlo sin restricciones, incluso mas de una vez por día.

¿Funciona con alguna marca de cremas / geles en particular?

Los equipos Glaps sinergizan con todas las buenas marcas presentes en el mercado. Consulte con su cosmetóloga que vehículos y que activos son recomendables para cada protocolo de uso.

¿Hay algún paso a paso donde pueda guiarme para los diferentes tratamientos?

En nuestra página oficial puedes consultar los diferentes protocolos de uso y su paso a paso mas la recomendación de los productos a utilizar: www.glaps.com

ACCION DEL MASAJEADOR FACIAL EN NUESTRA DERMIS

Essence deep into the bottom of the muscle, lock the truth
Desalination Black Eye
Release Bright




Leading-in and absorption

Cool for compact

Vibrate and massage

Warm to drain contamination

Ultrasonic wave leading-in
Nutrition input, elastic, moist, without blemish

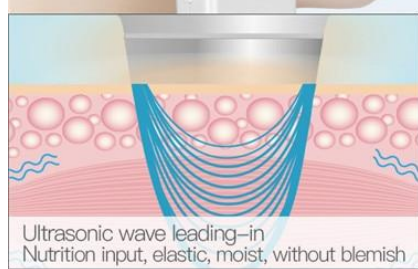

Calor
Circulación por drenaje
42°C

Frio
Circulación por drenaje
6°C



42°C thermothermal cycle, desalination of melanin

6°C ice contraction

ACCION DEL MASAJEADOR FRIO CALOR EN NUESTRA DERMIS



Descripción del producto

