



Elaps


GLOBAL AESTHETICS PRODUCTS & SERVICES



BODY CUP MASSAGER

Presentación
Comercial.

Glaps

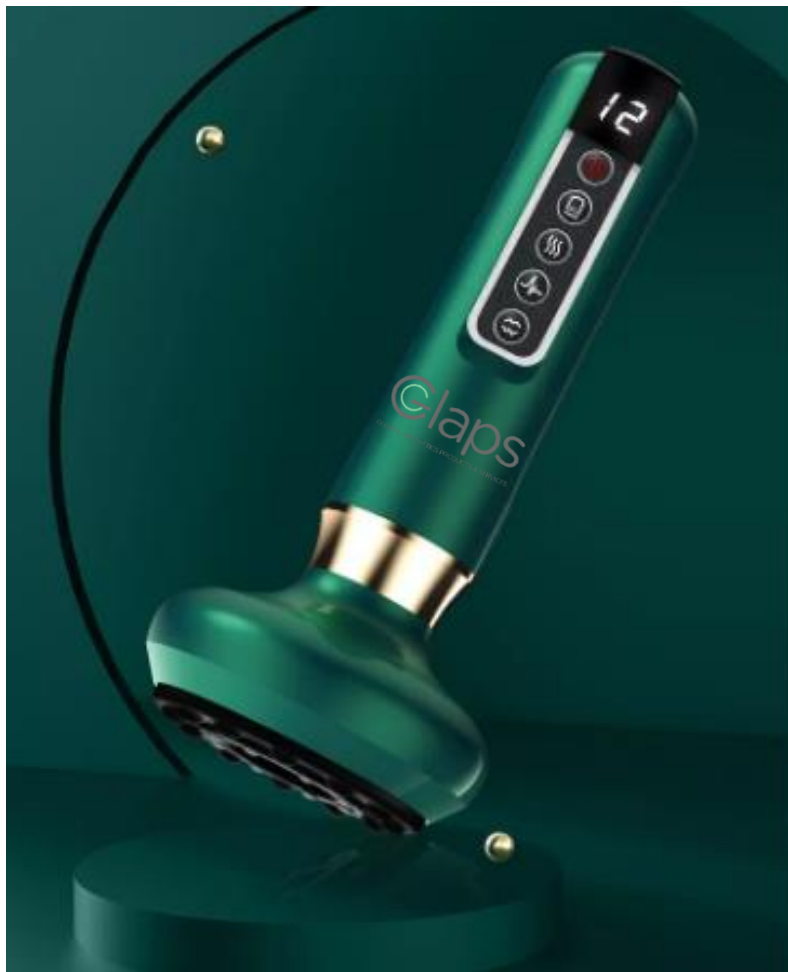

BODY CUP MASSAGER

El Body Cup Massager es un equipo de última generación que combina la presión negativa (succión) con la temperatura para diferentes efectos corporales.

Es la combinación de la antigua terapia china de ventosas y la técnica *gua sha* con la moderna terapia infrarroja y el masaje con piedras calientes, un remedio maravilloso para mejorar el flujo sanguíneo, activar el drenaje linfático, calmar el dolor muscular y erradicar la celulitis y las estrías. Ideal para la espalda, hombros, cintura, glúteos y extremidades. Se puede utilizar para una variedad de objetivos generales de bienestar, que incluyen, entre otros, acelerar la recuperación física, eliminar la fatiga y el rejuvenecimiento de la piel.


Detalles del Producto



Nombre del Producto	BODY CUP MASSAGER
Modelo Código	G18
Material:	ABS+ Acero inoxidable
Tamaño & Peso	20*9*9 cm 300 grs
Packaging	Gift box
Tamaño packaging	229 mm*127mm*97mm
Características tecnológicas	Ventosa presión negative /Raspado / Temperatura
Especificaciones:	12 niveles de intensidad de succion 12 niveles de temperature función de “Alivio de presion”
Cargador	USB
Voltage de entrada	5V – 1 A Poder 8w
Frecuencia de uso	1-2 veces por semana



Funciones del Body Cup Massager

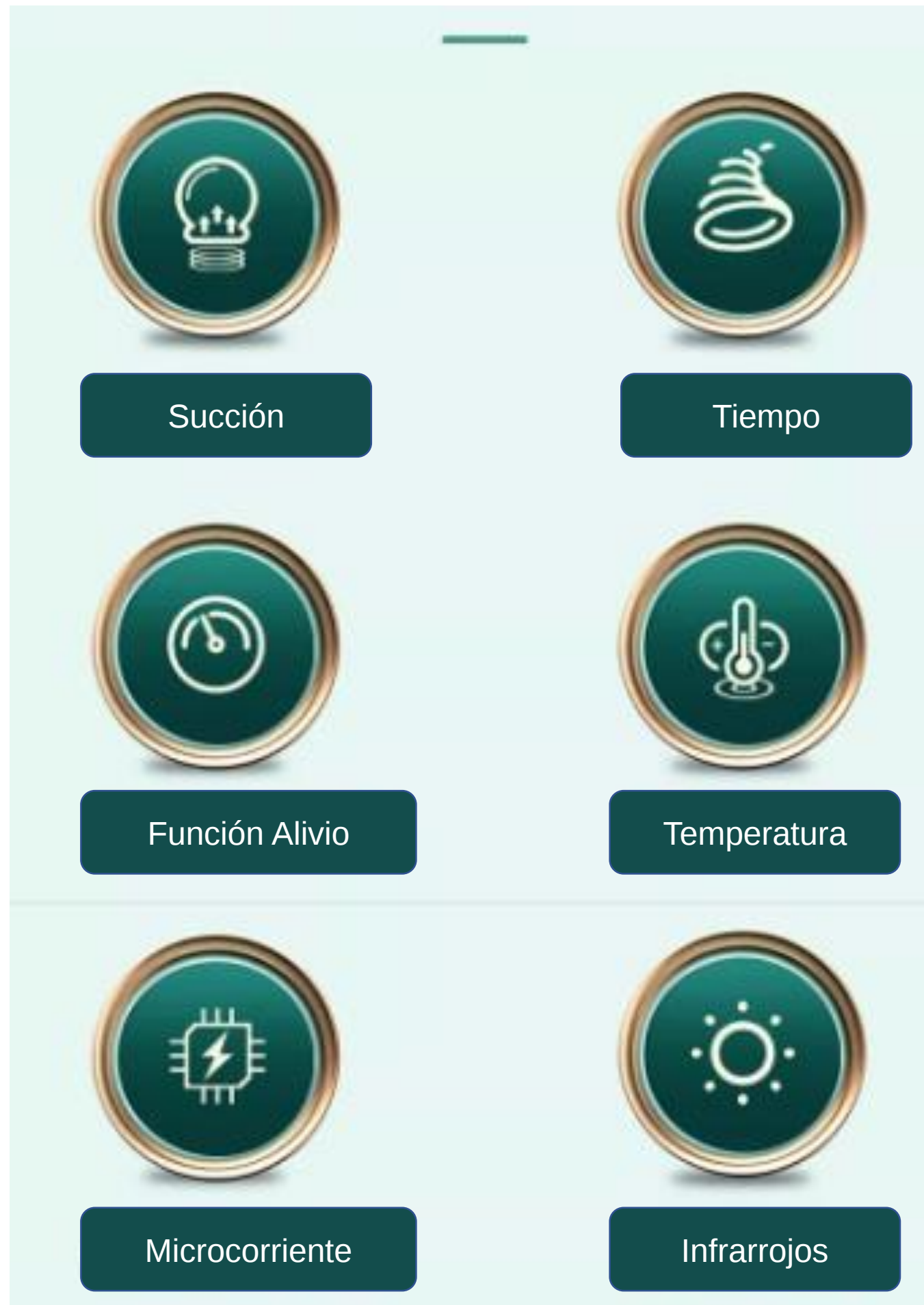

- Opera inalámbricamente luego de cargado
- Titila en blanco la luz mientras carga queda fija al estar full.
- Tiene una programación automática de 20 minutos
- El display digital muestra la cuenta regresiva hasta apagarse.
- Al encender el equipo el display mostrará 00 minutos pero al sostener 2 segundos mostrará los 20 minutos de programación.
- El equipo tiene 12 niveles de intensidad de presión negativa (succión). Cada vez que se ajusta la intensidad el display muestra la correspondiente.
- La función de temperatura no se activa automáticamente en el encendido, también tiene 12 intensidades. Cuando la temperatura se incrementa en 1° la luz roja del equipo lo muestra.

Características del producto

Esferas metálicas que facilitan el efecto sobre la piel



METODO Y MODO DE USO

Antes de encender el equipo seleccione la función de acuerdo a sus necesidades y comience a utilizarlo luego de aplicar el aceite sobre las partes del cuerpo a trabajar.

En caso de pieles sensibles testear previamente en el lado interior del brazo, en caso de enrojecimiento detener su uso inmediatamente.

No aplicar aceite en el equipo solo sobre las partes del cuerpo seleccionadas.

El equipo trae un filtro absorbente que evita que ingrese aceite en la parte interior motora y protege / prolonga la vida útil. Luego del uso retirar el filtro limpiarlo y airearlo

Electro Estimulación Muscular

Glaps



12 niveles de programación
de temperatura

CUPPING MASSAGE




Cómo utilizar la función alivio de presión?



El Body Cup Massager cuenta con una función de “CALMA” que manteniéndola presionada deja de realizar la presión de succión programada.

Infrarrojos Microcorriente

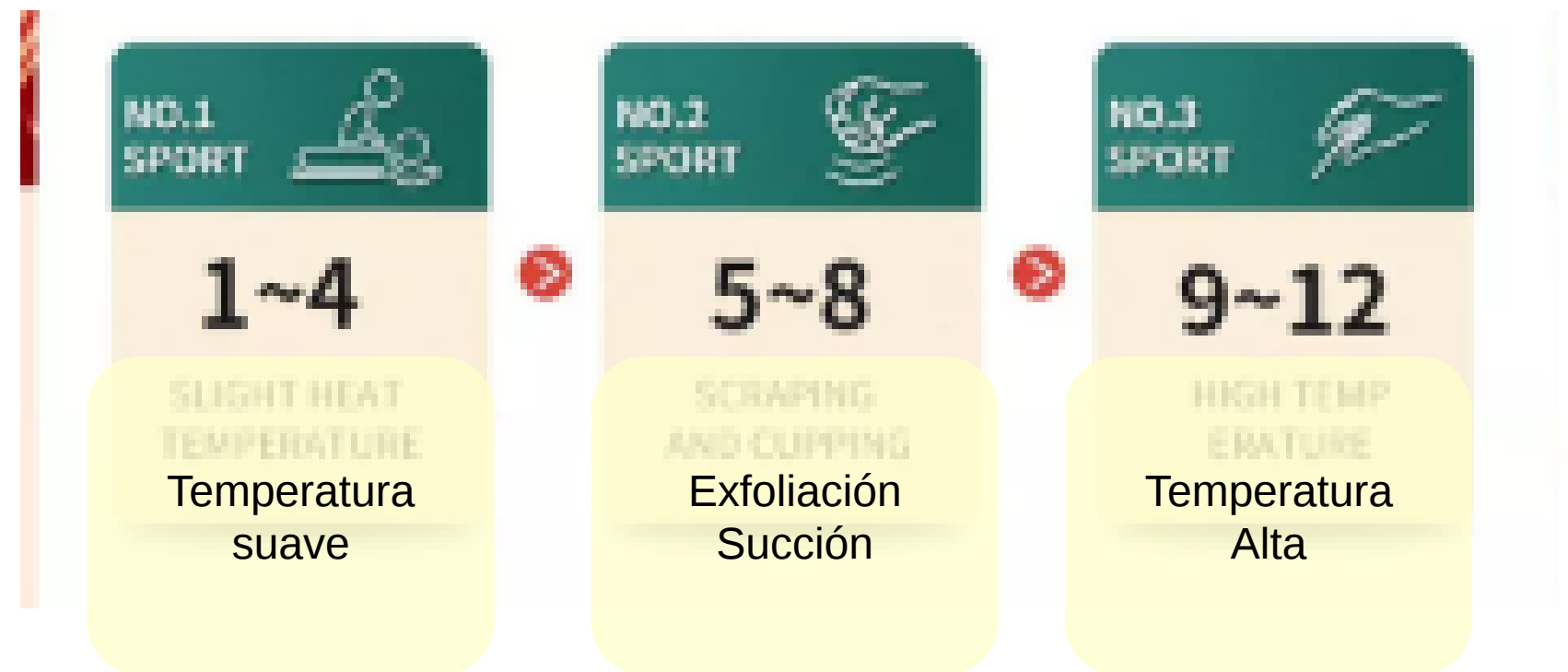

Precauciones



1. Guarde el equipo en un lugar resguardado. No apoyar objetos pesados sobre el equipo para evitar daños
2. Guardar en un lugar seco y ventilado, evitar la luz directa del sol y cualquier erosión de líquidos.
3. Mantener alejado de los niños
4. Si no se utiliza por largo tiempo cargar completamente cada 2 meses y desconectar el cable.
5. En caso de fallas técnicas contacte a su proveedor. No intente desarmar el equipo
6. Antes de limpiarlo el equipo debe estar desconectado, apagado y en temperatura normal.
7. Higienice con esponja o toalla húmeda y suave. No usar limpiadores químicos ni corrosivos
8. No es un equipo resistente al agua, prohibido su uso en ambientes húmedos ni lavarlos con agua u otros líquidos ya que podría generar cortocircuito en el equipo.
9. No utilizar en pieles con sangrado o sobre venas varicosas
10. No utilizar durante embarazos, períodos menstruales, piel dañada, post operatorios o cuadros febriles.
11. No utilizar en pacientes con desordenes sanguíneos como leucemia, hemofilia o trombocitopenia, etc