

APARATOLOGÍA

Optimiza la absorción
de activos en la piel



evolución en el
cuidado de la piel

DERMASSY



NANO DERMAPEN

Equipo de Microneedling.
Técnica de inducción de colágeno (TIC):
Optimiza la absorción de activos en la piel.

NANO CHIP

Nano agujas de silicona de alta pureza, talladas con micro y nanotecnología que penetran en la barrera cutánea logrando que esta absorba activos de manera segura y eficiente. Su diámetro es de 80 nano milímetros.

- NO PRODUCE INJURIAS • NO TIENEN FILO • INDOLORO
- MAYOR ABSORCIÓN DE ACTIVOS • SIN EFECTOS SECUNDARIOS

Genera en la membrana celular por simple contacto, un proceso temporario de apertura de microporos. Así se produce un mayor intercambio de moléculas interiores y exteriores, beneficiando la absorción de activos, como el colágeno. Una vez finalizado el proceso los microporos se cierran y las células dejan de absorber.

5 MEDIDAS DE NANO CHIPS

Los mm indican la profundidad de las nanoagujas



- 0.10 mm
- 0.15 mm
- 0.20 mm
- 0.25 mm
- 0.30 mm

MODO DE EMPLEO

- 01 Cargar el equipo a una fuente de corriente apropiada.
- 02 Enroscar el Nano Chip en el cabezal del Nano Chip Derma Pen.
- 03 Encendido y regulación de intensidad.
- 04 Limpiar y secar el rostro.
- 05 Extender una buena cantidad de activos hidrosolubles y estériles en la zona a tratar.
- 06 Aplique el cabezal del Dermassy Nano Dermapen directamente sobre la piel en posición perpendicular o a 45°, ajustando la intensidad deseada.
- 07 Los movimientos deben de ser lentos, en forma circular en superficies de 10 cm de diámetro. El cabezal debe estar siempre en contacto con la piel. Utilizar el equipo hasta 3 veces por zona, por no más de 3 seg. cada vez.
- 08 Repetir los mismos pasos para tratar otra zona del rostro con el equipo.
- 09 Utilizar el equipo de 10 a 15 minutos.
- 10 Finalizado este tiempo retirar el excedente de activos que haya podido quedar en el aparato para dejarlo listo para su próximo uso.
- 11 Descartar el Nano Chip.
- 12 Higienizar el equipo con algodón o gasa y loción sanitizante.



Presione el botón de encendido ON/OFF por 25 segundos, se encenderá una luz roja que indica intensidad alta. Presione nuevamente y se encenderá una luz verde que indica intensidad media. Presione nuevamente y se encenderá una luz azul que indica intensidad baja. Seleccione la intensidad deseada.

INCLUYE: EQUIPO CON BATERÍA DE LITIO, CABLE USB Y DOS CABEZALES DE NANO CHIP DE SILICONA.



EQUIPO DE ELECTROPORACIÓN PORTATIL + TERAPIA LED

Mesoterapia sin agujas que optimiza la absorción de activos liposomados y/o hidrosolubles en la piel. Combina la electroforesis y la terapia Led, abriendo microporos en los canales proteicos de la membrana celular a través del folículo piloso, las glándulas sudoríparas y la capa córnea, promoviendo la circulación y permitiendo así una mayor absorción.

- ATENÚA LAS ARRUGAS PERI ORBITALES Y DISMINUYE EL ACNÉ.
- MEJORA LA PIEL CON CELULITIS Y LAS ESTRÍAS.
- MANTIENE LA HIDRATACIÓN DE LA PIEL.

Se aplica aproximadamente durante 10 a 15 minutos. Es apto tanto para tratamientos faciales como corporales. En el caso de realizar tratamientos faciales se recomienda dividir el rostro en mitades e ir trabajando lentamente en cada lado del mismo. Si el tratamiento es corporal, se recomienda dividir la zona en cuadrantes y trabajar alrededor de 5 a 10 minutos por zona.

TRATAMIENTOS CORPORALES:

Reducción de grasa y peso corporal en:

Abdomen, Muslo, Caderas, Brazos, Cintura, Escote.

El dispositivo beneficia la absorción de activos reductores, estimulando la movilidad de la grasa corporal y el drenaje linfático.

TRATAMIENTOS FACIALES:

Contorno de ojos y labios, Frente, Doble Mentón, Cuello: hidrata, reduce líneas de expresión y tensa.

Pecas y blanqueamiento de piel: abre los canales celulares sin lastimarlos permitiendo su mejor nutrición y recuperación celular.

Las arrugas se atenúan por la acción del dispositivo que optimiza la absorción de activos nutritivos, permitiendo la renovación celular.

Tratamiento de acné: los activos para tratar el acné actúan directamente en el foco, limpian y reducen las probabilidades de nuevas manifestaciones e infecciones.

Hidratación: los activos hidratantes aportan la suficiente cantidad de agua para prevenir los problemas cutáneos derivados de la falta de la misma.

MODO DE EMPLEO

- 01 Gire la perilla de encendido ON/OFF y verifique que se enciendan las luces Led.
- 02 Seleccione la intensidad deseada.
- 03 Aplicar directamente sobre el parche o activo elegido (Liposomado / Hidrosoluble).

* No utilizar en contacto directo con la piel.



DERMASSY



DERMASSY

El mundo en tu piel

dermassy.com
info@dermassy.com

