

Beauty 5 en 1

Presentación del equipo

El Beauty 5 en 1 es un innovador dispositivo de cuidado y belleza que utiliza tecnología avanzada Nano Skin. Este equipo versátil combina cinco funciones especializadas: **Ultrasonido, Ion Galvánico (+), Ion Galvánico (-), 3 Luces Led y Vibración**, que pueden utilizarse de manera conjunta o individual, adaptándose a las necesidades específicas de cada tratamiento. Entre sus múltiples beneficios, el Beauty 5 en 1 ofrece una limpieza profunda al utilizar con productos ionizables de limpieza en conjunto con la vibración, mejora el aspecto del acné, trata y previene el envejecimiento y sus manifestaciones, y promueve la firmeza y el rejuvenecimiento de la piel. Además, reduce significativamente las arrugas y líneas de expresión, dejando la piel más suave, limpia y equilibrada. El Beauty 5 en 1 es la herramienta tecnológica ideal para obtener resultados profesionales en el cuidado de la piel.

Funciones del Beauty 5 en 1

1. Ultrasonido de 3Mhz

Beneficios: Penetración profunda de productos, reducción de líneas finas y arrugas, mejora de la textura de la piel.

2. Galvánica, ION (+) / ION (-)

Beneficios: Aumento de la absorción de nutrientes, desintoxicación de la piel, estimulación de la regeneración celular.

3. Luces LED

Beneficios: Tratamiento de diversas condiciones de la piel como acné, hiperpigmentación, y signos de envejecimiento, mejora de la salud general de la piel.

4. Vibración

Beneficios: Relajación muscular, mejora de la circulación, reducción de la tensión y el estrés

Funciones

Ultrasonido

Descripción: El ultrasonido es una tecnología avanzada que ofrece múltiples beneficios a través de sus efectos térmicos, físicos y químicos. El ultrasonido facial utiliza una frecuencia de **3MHz**, lo que permite una penetración más profunda, ideal para tratamientos faciales.

Beneficios

- **Rejuvenecimiento Facial:** El masaje celular y la estimulación de la citomembrana mejoran la textura y firmeza de la piel, reduciendo líneas finas y arrugas.
- **Mejora de la Absorción de Productos:** Aumenta la permeabilidad de la piel, facilitando la absorción de nutrientes y activos en productos de cuidado facial.
- **Estimulación de Colágeno:** Los efectos térmicos promueven la producción de colágeno, mejorando la elasticidad y la apariencia juvenil de la piel.
- **Descongestión y Reducción de Edemas:** Ayuda a reducir la inflamación y la hinchazón, descongestionando la piel y mejorando su aspecto general.

Galvánica

Descripción: La galvánica es una tecnología avanzada que utiliza corrientes galvánicas para mejorar la salud y apariencia de la piel mediante dos modos principales: ion positivo y ion negativo.

ION POSITIVO (+)

Descripción: Utiliza la atracción de cargas opuestas para limpiar profundamente la piel, siempre y cuando el producto sea de limpieza. En caso de ser un producto de nutrición con **ion +**, se repelen y, penetra mas profundamente el principio activo.

Beneficios

- **Limpieza Profunda:** Los iones positivos atraen las impurezas y la suciedad, incluso las que se encuentran en los poros más profundos, ayudando a eliminar comedones y toxinas.
- **Desobstrucción de Poros:** Facilita la limpieza profunda de los poros, reduciendo la aparición de puntos negros y blancos.
- **Preparación de la Piel:** Al limpiar profundamente, prepara la piel para recibir tratamientos posteriores, mejorando la eficacia de otros productos y procedimientos.

ION NEGATIVO (-)

Descripción: Utiliza la repulsión de cargas similares para facilitar la nutrición profunda de la piel. Siempre y cuando el producto indique que es ionizable por polo **ion -**.

Beneficios

- **Nutrición Profunda:** Los iones negativos empujan los nutrientes y principios activos de los productos más profundamente en la piel, mejorando su absorción.

- **Hidratación y Reparación:** Ayuda a introducir ingredientes hidratantes y reparadores en capas profundas de la piel, mejorando la hidratación y acelerando la regeneración celular.
- **Mejora de la Textura de la Piel:** Contribuye a una piel más suave, tersa y uniforme al optimizar la absorción de productos nutritivos

Masajes con vibración

Descripción: Emplea vibraciones mecánicas para estimular los músculos y la piel, promoviendo una serie de efectos beneficiosos.

Beneficios

1. Aceleración del Metabolismo

- **Beneficio:** Las vibraciones aumentan la circulación sanguínea y linfática, lo que acelera el metabolismo celular. Esto permite que las células funcionen de manera más eficiente y elimina más rápidamente los desechos metabólicos.
- **Resultado:** Mejora general de la salud de la piel y los tejidos, con un aspecto más radiante y vital.

2. Regeneración Celular

- **Beneficio:** La estimulación mecánica de las vibraciones promueve la regeneración celular, lo que ayuda a reparar y renovar la piel.
- **Resultado:** Piel más joven y saludable, con una mayor capacidad de recuperación y regeneración.

3. Absorción de Nutrientes

- **Beneficio:** El masaje con vibración mejora la permeabilidad de la piel, facilitando una mayor absorción de nutrientes y principios activos de los productos aplicados.
- **Resultado:** Mejora la eficacia de los tratamientos tópicos, con nutrientes que penetran más profundamente en la piel.

4. Relajación Muscular

- **Beneficio:** Las vibraciones mecánicas ayudan a relajar los músculos tensos y aliviar la tensión.
- **Resultado:** Sensación de bienestar y reducción del estrés, mejorando la comodidad general durante y después del tratamiento.

5. Mejora de la Circulación

- **Beneficio:** Las vibraciones estimulan la circulación sanguínea y linfática, lo que mejora la oxigenación y nutrición de los tejidos.
- **Resultado:** Piel más sana y de mejor aspecto, con una reducción de la inflamación y edemas.

PhotonLED terapia

La terapia **LED** utiliza diferentes longitudes de onda de luz que penetran en la piel a distintas profundidades, ofreciendo una serie de beneficios específicos para diversos problemas y condiciones de la piel. Es una técnica segura y no invasiva, sin efectos secundarios perjudiciales.

Descripción: Utiliza longitudes de onda específicas de luz para excitar las células de la piel, promoviendo la producción de colágeno, mejorando la elasticidad, aumentando la circulación sanguínea y liberando toxinas.

LUZ ROJA

La luz roja emite una longitud de onda larga para penetrar de forma profunda en la piel. Esta luz está indicada en terapias de rejuvenecimiento cutáneo, permitiendo eliminar o suavizar líneas de expresión del rostro; activa la formación del colágeno y la elastina mejorando la flacidez. Promueve la absorción de nutrientes.

LUZ VERDE

Crea un efecto calmante en la piel con propiedades antiinflamatorias y descongestiva, evita el envejecimiento prematuro, ideal para pieles sensibles.

LUZ AZUL

La luz azul tiene un efecto bactericida la cual es ideal para el tratamiento del acné y sus problemas inflamatorios. La luz azul es fría y ayuda a mitigar las lesiones y bajar la inflamación. Inhibe la formación de sebo. Mejora el diámetro del poro. Penetra la piel y produce un radical de oxígeno que destruye la bacteria causante del acné. Cuando la luz es absorbida por la bacteria se destruye disminuyendo la inflamación y enrojecimiento.

Preguntas frecuentes

- **¿Es un equipo facial & corporal?**

El Beauty en 1 es un equipo únicamente de uso facial ya que el ultrasonido de 3Mhz no penetra tan profundamente como para trabajarlo en corporal. Además el tamaño del cabezal no es apto por su tamaño pequeño.

- **¿Cuántas veces debo usar el equipo para ver resultados?**

Con un máximo de 3 veces por semana y no mas de 15 minutos cada vez obtendrá los mejores resultados, eligiendo las funciones deseadas y con los niveles de intensidad acordes para cada tipo de piel. Es importante recordar que la *performance* del equipo tiene directa relación con los nutrientes que estemos aplicando en el tratamiento.

- **¿Es un electroporador?**

No, no es electroporador. Actúa de manera similar ya que a través de la galvánica ayuda a la penetración de activos.

- **¿Se puede programar todas las funciones juntas e individuales?**

Si, es un equipo que permite programar todas las funciones de manera conjunta o individual.

- **¿Es inalámbrico?**

Si, funciona con carga USB.

- **¿Cuál es la autonomía del equipo?**

Depende del tipo de protocolo que se este realizando en base a la configuración de las funciones del equipo y tiempo trabajado. Por ejemplo, si se realiza un tratamiento completo de 15´ con todas las funciones programadas, dura aproximadamente 30/45´.

- **¿Se puede utilizar en pacientes embarazadas?**

- No. En personas que tengan marca pasos, tampoco.

- **¿Cómo se si necesita recarga de batería?**

El dispositivo muestra la necesidad de recarga o si está en proceso de recarga con un ícono que aparece en el display junto a la descripción «*Beauty Inside*»

- **¿No siento calor o temperatura, es correcto eso?**

El Beauty 5 en 1 trabaja sobre las capas mas profundas de la piel, por ende no debería percibirse temperatura sobre la epidermis mas allá del efecto del producto cosmecéutico utilizado. La única sensorialidad a percibirse son los efectos de la función «micro masaje» en caso que haya sido seleccionada en su configuración.

¿Con qué productos utilizar?

- Productos de base acuosa para que haya conductividad en todas las funciones:
 - Serums
 - Gel Cream
 - Ampollas hidrozolubles
 - Emulsiones ligeras
 - Lociones
 - Geles

Contraindicaciones

- *No se puede utilizar en personas con marcapasos.*
- *No se puede utilizar en mujeres embarazadas.*
- *No se puede utilizar en personas con problemas oncológicos.*
- *No se puede utilizar en personas con problemas de tiroides.*
- *No se puede utilizar en niños.*
- *No utilizar sobre implantes metálicos para evitar molestias.*
- *No se recomienda utilizar en rosáceas y acné muy fuertes.*

Precauciones

- Si los cables y conectores están dañados por el calor y la toma esté suelta, no utilice el instrumento.
- No lo coloque en los lugares fáciles de mojarse, como el lavabo. El equipo posee elementos tecnológicos que pueden dañarse o entrar en cortocircuito.
- No intente desarmar el equipo, los componentes solo pueden ser trabajados por técnicos profesionales.
- Las mujeres embarazadas y los pacientes con cardiopatía grave no pueden utilizarlo.
- Mantener el equipo fuera del alcance de los niños.
- No dejar mas de 15 días sin cargar o utilizar el equipo para no dañar la batería.
- La primer carga debe ser de 3hs.