

Termomasajeador ojos&labios EVOLUTION

Presentación del equipo

El **Termomasajeador Ojos & Labios Evolution** es un dispositivo de última generación diseñado especialmente para trabajar zonas delicadas del rostro como el **contorno de ojos, zona peribucal y entrecejo**. Su tecnología avanzada combina **vibración, temperatura regulable** (entre 38°C y 45°C) y **terapia LED tricolor**, logrando un tratamiento completo, no invasivo y altamente efectivo.

Funciones

Vibración:

Estimula la microcirculación y favorece la penetración de activos cosméticos.

Temperatura controlada (38–45°C): Relaja la musculatura facial, mejora la absorción de productos, estimula colágeno y aporta confort a la piel.

Terapia LED (3 colores):

- **Luz roja:** Estimula la producción de colágeno, ideal para pieles maduras.
- **Luz azul:** Ayuda a descongestionar y calmar, disminuyendo bolsas e hinchazón.
- **Luz amarilla:** Calma la piel sensible y reduce la pigmentación.

Beneficios principales:

- Reafirma la piel y atenúa **líneas de expresión** y arrugas finas.
- Disminuye visiblemente **ojeras, bolsas e inflamación**.
- Mejora el tono y la textura de la piel en zonas delicadas.
- Estimula la regeneración celular y la **absorción de activos cosméticos**.
- Ayuda a prevenir y tratar los **signos del envejecimiento**, dejando la piel más suave, luminosa y equilibrada.

Preguntas frecuentes

- **¿En qué zonas puedo usar el Termomasajeador Evolution?**

Este dispositivo está diseñado para trabajar en zonas específicas como el contorno de ojos, entrecejo y área peribucal (alrededor de los labios), donde suelen aparecer las primeras líneas de expresión.

- **¿Cuántas veces se puede utilizar el equipo?**

Podés utilizarlo de 2 veces por día, dependiendo del estado de tu piel y los objetivos del tratamiento.

- **¿Es inalámbrico?**

Sí, funciona con carga USB. La primer carga debe ser de 3hs.

- **¿Puedo usarlo con cualquier crema o serum?**

Sí, pero para potenciar resultados se recomienda usarlo con productos específicos para contorno de ojos y boca, preferentemente con principios activos compatibles con calor y vibración.

- **¿Qué función cumple la temperatura? ¿Es segura para el área ocular?**

La temperatura entre 38°C y 45°C favorece la relajación muscular y la penetración de activos. Es totalmente segura para la zona ocular cuando se usa según las indicaciones.

- **¿Cómo se si necesita recarga de batería?**

En el display digital puede observarse la carga de la batería.

- **¿Tiene contraindicaciones?**

No se recomienda su uso en pieles con lesiones abiertas, infecciones activas, procesos inflamatorios agudos o después de procedimientos invasivos recientes. Ante cualquier duda, consultar con un profesional.

- **¿Puede usarse en gabinete y en casa?**

Sí, su diseño portátil y funciones inteligentes lo hacen ideal tanto para uso profesional como personal.

¿Con qué productos utilizar?

- Contorno de ojos en gel o crema ligera:
- Preferentemente con activos como ácido hialurónico, péptidos, vitamina C, niacinamida o cafeína. Estos ingredientes ayudan a tratar bolsas, ojeras, líneas de expresión y a mejorar la textura de la piel.
- Sérums ionizables o concentrados específicos para líneas finas:
- Pueden potenciar el efecto del calor y la vibración, mejorando la penetración y eficacia del tratamiento.
- Ampollas faciales reafirmantes o iluminadoras:
- Ideales si querés usar el equipo en protocolos más intensivos o combinados.

Es importante que el producto sea compatible con temperatura y vibración, y que no contenga alcoholes agresivos o texturas muy pesadas que puedan obstruir poros en zonas delicadas.

Contraindicaciones

No se recomienda su uso en los siguientes casos:

- Piel con lesiones abiertas, heridas activas, eccemas o infecciones cutáneas.
- Procesos inflamatorios agudos o post-procedimientos invasivos recientes (peelings profundos, dermapen, láser, etc.).
- Piel extremadamente sensible o con diagnóstico de rosácea activa (consultar con profesional).
- Presencia de marcapasos o implantes electrónicos.
- Embarazo y lactancia, salvo autorización médica.
- Personas con alteraciones neurológicas o sensibilidad disminuida, que no puedan percibir el calor correctamente.
- Zona del globo ocular, párpado superior e inferior directo: Aunque es apto para el contorno, se debe evitar el contacto directo con los ojos.
- Enfermedades sistémicas o autoinmunes descompensadas, sin supervisión médica.

Importante: Siempre se recomienda realizar una prueba de sensibilidad en una pequeña zona antes del primer uso y consultar con un profesional en caso de duda.

Precauciones

- Si los cables y conectores están dañados por el calor y la toma esté suelta, no utilice el instrumento.
- No lo coloque en los lugares fáciles de mojarse, como el lavabo. El equipo posee elementos tecnológicos que pueden dañarse o entrar en cortocircuito.
- No intente desarmar el equipo, los componentes solo pueden ser trabajados por técnicos profesionales.
- Las mujeres embarazadas y los pacientes con cardiopatía grave no pueden utilizarlo.
- Mantener el equipo fuera del alcance de los niños.
- No dejar mas de 15 días sin cargar o utilizar el equipo para no dañar la batería.
- La primer carga debe ser de 3hs.